

Desinfektionsmittelverträglichkeiten

VOWA_{led} Polsterkunstleder

■ geeignet ○ ungeeignet bei hellen Farben

Hersteller	Pisa	Padova Plus	Peri	Pulfero _{EL}	Palm Beach
Akzo Nobel					
Natriumhypochlorid	■	■	■	■	■
Bode					
Bacillol AF	■	■	■	■	■
Cutasept	■	■	■	■	■
Braun					
Meliseptol Foam Pure	■	■	■	■	■
Softasept N	■	■	■	■	■
Meliseptol	■	■	■	■	■
Helipur	■	■	■	■	■
Melsitt	■	■	■	■	■
Melsept	■	■	■	■	■
Desomed					
Desomed Rapid	■	■	■	■	■
Dr. Schumacher					
Descosept AF	■	■	■	■	■
Ecolab					
Incidin foam	■	■	■	■	■
Incidin Plus	■	■	■	■	■
Incidin perfekt	■	■	■	■	■
Incidin liquid	■	■	■	■	■
Favodent Karl Huber					
Flora quick	■	■	■	■	■
Henkel					
Incidur-Spray	■	■	■	■	■
Lysoform					
Fugaten Spray	■	■	■	■	■
Orochemie					
B45	■	■	■	■	■
Peppler					
Micro clan	■	■	■	■	■
Pepp clean	■	■	■	■	■
Ruck					
Sprühdesinfektion	■	■	■	■	■
Reckitt Benckiser					
Sagrotan med	■	■	■	■	■
Schülke & Mayr					
Kodan Tinktur Forte	■	■	■	■	■
Esemfix	■	■	■	■	■
Octenisept	■	■	■	■	■
Mikrozid AF	■	■	■	■	■
Unident					
Unsisepta foam	■	○	■	■	■

Wir empfehlen vor der Anwendung eines Desinfektionsmittels an einer nicht sichtbaren Stelle des Bezuges eine Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.

Hinweis: Getestet wurde die höchst empfohlene Konzentration in jeweils 50 Anwendungen. Die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels muss in allen Fällen beachtet werden. Eine Beeinträchtigung des Materials ist bei Langzeitgebrauch nicht ausgeschlossen. Kommen nicht gelistete Desinfektionsmittel zu Anwendung, können Sie sich jederzeit für einen Verträglichkeitstest mit unserem Labor in Verbindung setzen. Der Wechsel von Desinfektionsmitteln, besonders bei Anwendungen eines Mittels über einen längeren Zeitraum, sollte vermieden werden, da ansonsten Produktschädigungen nicht auszuschließen sind. Bei regelmäßigem Einsatz von alkohol- bzw. lösemittelhaltigen Erzeugnissen kann eine negative Beeinflussung der lackierten Oberfläche sowie eine langfristige Materialversprödung eintreten. Da wir auf die Herstellung und auf die Rohstoffe für die Desinfektionsmittelproduktion keinen Einfluss nehmen können, müssen wir jegliche Garantieleistung auf die Desinfektionsmittelbeständigkeit der gelisteten VOWALON-Kollektionen ablehnen

VOWALON Beschichtung GmbH
Bahnhofstraße 46
08233 Treuen

Telefon: +49(0)37468/60-0
Telefax: +49(0)37468/60-254

E-Mail: info@vowalon.de
Internet: www.vowalon.de

Bankverbindungen:

Commerzbank

Konto:350 581 00
BLZ: 870 400 00

Swift BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE05870400000350658100

Sparkasse Vogtland

Konto:3580 002 642
BLZ: 870 580 00

Swift BIC: WELADED1PLX
IBAN: DE02670580003580002642

Deutsche Bank

Konto:4200 465 00
BLZ: 870 700 00

Swift BIC: DEUTDE8C
IBAN: DE86870700000420046500

Geschäftsführer: Gregor Götz, Friedmar Götz

USt-IdNr.: DE 141095230
Steuer.-Nr.:223 / 121 / 00626

Kreisgericht: Chemnitz
Handelsregister: HRB1072

