



Massagestuhl und Therapiestuhl "Inversor"

Therapiestuhl mit einem sehr stabilen und standsicheren Alurahmen. Die Sitzhöhe kann manuell verstellt werden. Der Neigungswinkel sowie Kopfteilverstellung und Neigung sind per Knopfdruck mühelos einstellbar. Inklusive gibt es eine Gesichtsauflage.

Preis: 395,00 €

Massagestuhl und Therapiestuhl - Ganzheitliche Verbesserung der körperlichen Gesundheit

Der Massagestuhl und Therapiestuhl "Inversor" ist ein multifunktionaler Therapiestuhl mit einem Rahmengerüst aus Aluminiumrohr, das mit grauer Epoxy-Pulverfarbe beschichtet und bei 250°C im Ofen gebrannt wurde. Die Polsterung besteht aus 5 cm dickem eingespritztem Polyurethanschaum mit einer mittleren Polsterhärte (Härtegrad II - Medium) als Standard. Das Kunstleder, mit dem der Stuhl gepolstert ist, ist flammhemmend und mit Sanitized antibakterieller Schutzbehandlung versehen. Der Stuhl entspricht der Klassifizierung M2 gemäß der Norm NFP 92-503 und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Er wiegt 9,5 kg und kann bis zu 135 kg belastet werden.

Höhenverstellung

Die Sitzhöhe kann durch Verlängern des Rohres eingestellt werden. Drücken Sie einfach den Knopf und stellen Sie den Sitz in die gewünschte Position ein. Die Länge des Spannkabels kann angepasst werden, indem Sie die Vorderseite des Sitzes leicht anheben. Dadurch lockert sich das Kabel, und Sie können es entfernen und in ein anderes höheres oder niedrigeres Loch platzieren.

Einstellen des Kopfteils und Zubehörs

Um das Kopfteil einzustellen, lösen Sie die Drehknöpfe und setzen Sie das Gestell in die Rückseite des Brustteils ein. Befestigen Sie das Kopfteil in der gewünschten Höhe und ziehen Sie die Drehknöpfe fest an. Um die Neigung einzustellen, lösen Sie die Klemmhebel und positionieren Sie das Teil in der gewünschten Position. Achten Sie darauf, dass die Zähne richtig ineinandergreifen, bevor Sie sie wieder festziehen. Die Höhe der Armablage wird durch Verkürzen oder Verlängern des Schultergurtes reguliert. Die Brust- und Kopfpolster sind mit Klettverschluss an der Struktur befestigt, so dass Sie die Position anpassen können.

Eigenschaften der Polsterung

Die Polsterung ist mit feuerhemmendem Kunstleder der Klasse M-2 gemäß den CE-Vorschriften versehen. Sie ist mit Sanitized antimikrobieller und antibakterieller Schutzbehandlung ausgestattet. Der Stuhl ist in 25 verschiedenen Farben erhältlich. Der Schaumstoff hat eine Dicke von 5 cm, und der Härtegrad des Schaumstoffs ist II - Ausgeglichen.

Sie haben Fragen? Einfach anrufen. Das Medizina-Team ist gerne für Sie da.

Das Produkt Massagestuhl und Therapiestuhl "Inversor"

Produktinformationen:

- Multifunktionseller Therapiestuhl
- Rahmengestell aus Aluminiumrohr, beschichtet mit grauer Epoxy-Pulverfarbe und im Ofen bei 250° C gebrannt
- Polsterung bestehend aus 5 cm eingespritztem Polyurethanschaum
- Polsterhärte II Medium (Standard)
- Gepolstert in flammhemmendem Kunstleder mit Sanitized antibakterieller Schutz
- Klassifizierung: M2 (Norma NFP 92-503). In verschiedenen Farben erhältlich
- Gewicht: 9,5 kg
- Belastbarkeit: 135 kg

Höhenverstellung:

- Die Einstellung der Sitzhöhe erfolgt durch Verlängern des Rohres
- Drücken Sie einfach auf den Knopf und stellen den Sitz in die gewünschte Position
- Länge des Spannkabels verändern: Ziehen Sie die Vorderseite des Sitzes leicht hoch, auf diese Weise lockert sich das Kabel und erlaubt Ihnen den Anschluss zu entfernen und in ein anderes höheres oder niedrigeres Loch zu platzieren

Einstellen von Kopfteil und Zubehör:

- Um das Kopfteil einzustellen lösen Sie die Drehknöpfe und setzen das Gestell in die Rückseite des Brustteils
- Befestigen Sie das Kopfteil in der gewünschten Höhe und ziehen Sie die Drehknöpfe fest an
- Um die Neigung einzustellen, lösen Sie die Klemmhebel (und legen Sie das Teil in die gewünschte Position)
- Achten Sie darauf, die Zähne richtig ineinander zu setzen, bevor Sie sie wieder anziehen
- Die Höhe der Armablage wird durch Verkürzen oder Verlängern des Schultergurtes reguliert
- Die Brust- und Kopfpolster sind mit Klettverschluss an der Struktur befestigt, so dass Sie die Position anpassen können

Eigenschaften der Polsterung:

- Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften
- Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
- Verfügbar in 25 Farben
- Dicke des Schaumstoffes 5 cm.
- Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen.

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 144
- Breite [cm]: 85
- Höhe [cm]: 90 bis 110

- Polsterstärken [mm]: 50
- Sitzhöhe [cm]: 48 bis 62

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 135
- Polster Verstellmöglichkeiten: Kopfteil, Armteil(e), Sitzteil
- Eigenschaften, Kriterien: Klappbar, tragbar
- Hersteller: Ecopostural
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Manuell (Handkurbel, Steckbolzen)
- Gestellform: Ohne Gestellbeine
- Gestellmaterial: Aluminium

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Armablagen, Sitzteil bzw. Mittelteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: manuell
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: flammhemmend EN 1021 1+2, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 30 Farben & Sonderfarben möglich

Polsterbezüge und Polsterfarben:

skai® Toledo EN

Hochwertiges skai® Polstermaterial für universelle Anwendungen. Seine charakteristische Rindsledernarbung verhilft Möbeln und Wänden zu schlichter Eleganz. Das besonders für den Objekteinsatz geeignete Material besticht außerdem mit inneren Werten: Die Oberfläche ist besonders robust und dennoch komfortabel. **Eigenschaften:** langlebig, reißfest, abriebfest DIN EN ISO 5470-2: ≥ 200 000 Martindale, schwer entflammbar DIN EN 1021-1+2, pflegeleicht, lichtecht, erfüllt DGM RAL GZ 430/4, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, weich und dehnfähig, erfüllt Medizinproduktegesetz, phthalatfrei, vegan - Materialzusammensetzung: ca. 84 % PVC-Compound, ca. 16 % PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m², Dicke: 1,4 +/- 0,2 mm



Weiß
(41)




Narzisse
(44)



Banane
(45)




Ocker
(46)

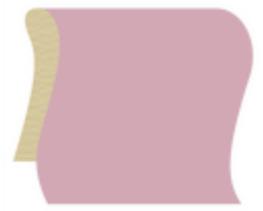

Rosé
(47)



Clementine
(48)

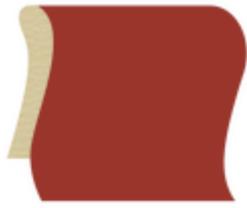

Mohn
(49)



Himbeere
(50)




Violett
(51)



Flieder
(52)



Königsblau
(53)

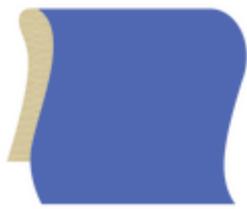

Kornblume
(54)



Himmelblau
(55)



Agave
(56)



Java
(57)



Kiwi
(58)



Grün
(59)



Graugrün
(60)



Cremé
(61)



Kastanie
(62)



Kirsche
(30)



Smoke
(31)



Anthrazit
(32)



Schwarz
(43)



Grau
(42)

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm




Anthrazit
(F6471015)



Deep Sea
(F64710 17 /18)




Weiß
(F6471002)

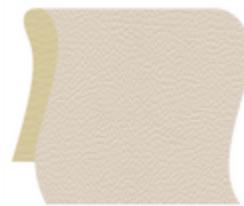

Perle
(F6471003)




Aschgrau
(F6471011)

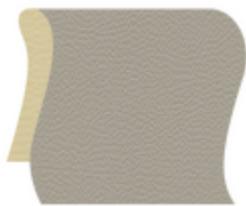


Birke
(F6471004)



Cappuccino
(F6471005)

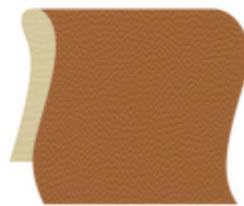

Kaschmir
(F6471006)

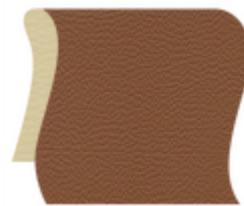


Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)

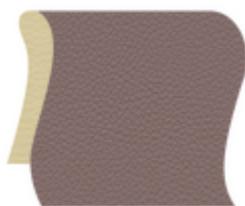

Nougat
(F6471025)

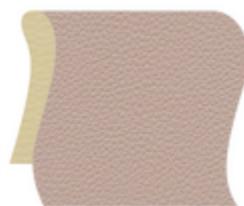

Rosé
(F6471026)




Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)




Sun
(F6471023)

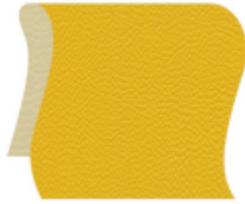


Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)

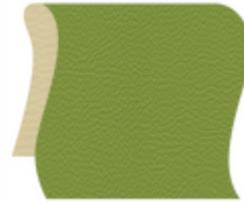


Olive
(F6471014)

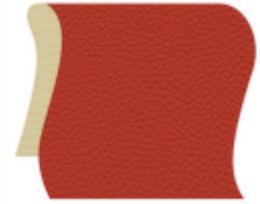


Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)

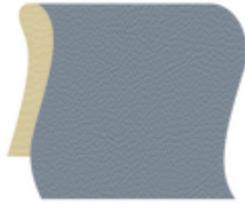

Stone Blue
(F6471001)

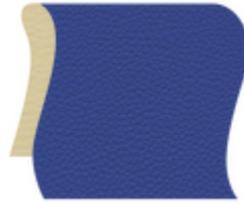

Atoll
(F6471021)



Schwarz
(F64710169)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de