



Chiropraktik Liege »Ther Drop« | 4-Segment-Dropfunktion, elektrisch höhenverstellbar

Elektrisch höhenverstellbare Chiropraktikliege mit Becken-, Lenden-, Brust- und Zervikal-Dropfunktionen und individuell konfigurierbaren Polstersektionen

Die Chiropraktik Liege Ther Drop ist elektrisch höhenverstellbar und verfügt über vier individuell konfigurierbare Drop-Segmente für präzise Manipulationen nach der Drop-Table-Technik. Entwickelt für

Physiotherapeuten, Osteopathen und Chiropraktiker bietet sie zudem eine flexibel einstellbare Kopf- und Fußsektion für maximale Behandlungsvielfalt.

Preis ab: 3.400,00 € zzgl. MwSt.

Moderne Chiropraktikliege mit Drop-Technik

Sie möchten in Ihrer Praxis manuelle Therapietechniken wie die Drop-Technik sicher und kraftsparend einsetzen, wissen aber nicht, welche Therapieliege sich dafür optimal eignet – vor allem, wenn Sie mit Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Körpergrößen, Beschwerden und Mobilitätsgraden arbeiten?

Chiropraktiker, Osteopathen und Physiotherapeuten stehen täglich vor der Herausforderung, eine Liege zu finden, die komplexe manuelle Behandlungsformen wie die Drop-Technik unterstützt und dabei auch Stabilität, Flexibilität und Komfort vereint. Die Chiropraktik Liege Ther Drop wurde exakt für diesen Anspruch entwickelt. Ihre elektrisch höhenverstellbare Konstruktion, vier einzeln konfigurierbare Drop-Segmente für Zervikal-, Thorakal-, Lumbal- und Beckenbereich sowie verstellbare Kopf- und Fußsektionen ermöglichen gezielte, präzise Manipulationen.

Entwickelt für höchste Präzision in der chiropraktischen Behandlung

Die Chiropraktik Liege Ther Drop bietet alles, was moderne manuelle Therapie heute verlangt. Entwickelt für den professionellen Einsatz in der Chiropraktik, vereint sie durchdachte Technik, ergonomische Funktionalität und maximale Flexibilität. Ihr modularer Aufbau mit vier individuell konfigurierbaren Drop-Segmenten ermöglicht gezielte Impulstechniken im Zervikal-, Thorakal-, Lumbal- und Beckenbereich, abgestimmt auf die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten.

Ergonomisch arbeiten - punktgenau behandeln

Die Manipulationsliege lässt sich elektrisch zwischen 52 und 96 cm in der Höhe verstellen. Über die umlaufende Rundumschaltung kann die optimale Arbeitshöhe intuitiv eingestellt werden – sogar bis auf 54 cm abgesenkt, ideal für manipulative Techniken unterhalb der Kniescheibe. So wird sowohl die therapeutische Kontrolle verbessert als auch die Belastung für die behandelnde Person reduziert.

Drop-Segmente für dynamische Therapie

Die präzise arbeitenden Drop-Segmente erlauben es, einzelne Körperpartien leicht anzuheben und dann gezielt abzusenken durch einen kurzen, definierten Impuls. Diese Technik wirkt besonders effektiv bei Mobilisationsbehandlungen und kann durch die Möglichkeit zur lateralen Drop-Anwendung auch in Seitenlage durchgeführt werden. Sie verringert die notwendige Kraft und macht Behandlungen effizienter, schonender und weniger invasiv.

Durchgehender Komfort durch anpassbare Polsterung

Mit einer Liegenbreite von 56 cm und einer hochwertigen Polsterstärke von 40 mm bietet die Chiropraktik Liege Ther Drop idealen Komfort für unterschiedlichste Körperformen. Der offenporige Polsterschaum mit einer Dichte von 40 kg/m³ sorgt für gleichmäßige Druckverteilung und Stabilität während der Behandlung. Die Kopfsektion verfügt serienmäßig über eine lange Nasen-/Mundöffnung sowie stufenlos höhenverstellbare Armauflagen. Je nach Anwendungsbereich kann das Kopfteil wahlweise mit

oder ohne Drop-Funktion bestellt werden. Die gepolsterte Fußsektion ist sowohl in Tiefe als auch Höhe verstellbar und ermöglicht eine Gesamtlänge der Liege von bis zu 190 cm.

Robuste Technik trifft auf einfache Mobilität

Das pulverbeschichtete Stahlgestell überzeugt durch seine hohe Standfestigkeit und ruhige Bewegungsmechanik. Alle Lagerstellen sind mit selbstschmierenden Buchsen ausgestattet, was für wartungsarmen und leisen Betrieb sorgt. Trotz ihrer massiven Bauweise bleibt die Chiropraktiker Liege von Chinesport flexibel im Raum einsetzbar: Versenkbare 40-mm-Rollen und ein zentrales Bremsssystem gehören zur Serienausstattung. Die maximale Belastbarkeit von 200 kg unterstreicht die solide Konstruktion, die auch bei hohem Praxisaufkommen zuverlässige Ergebnisse liefert.



Eine Investition in Präzision, Stabilität und patientenorientierte Therapie

Mit der Chiropraktik Liege Ther Drop erweitern Sie Ihre Praxis um ein kraftsparendes, leistungsstarkes Werkzeug. Vier Drop-Segmente, ergonomisches Design und durchdachte Technik ermöglichen chiropraktische Exzellenz auf höchstem Niveau – individuell, sanft und effizient.

Setzen Sie auf Qualität, Verlässlichkeit und therapeutischen Komfort. Diese Liege ist die ideale Lösung für eine moderne, professionelle Behandlung. Vereinbaren Sie jetzt ein [kostenfreies Beratungsgespräch](#) – wir beraten Sie gerne!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 190
- Breite [cm]: 56
- Höhe [cm]: 52-96
- Polsterstärken [mm]: 40

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Produktgewicht [kg]: 90
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm)
- Hersteller: Chinesport
- Serie: Ther Drop Line
- Modell: Ther Drop
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopfteil & Rückenteil (separat), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -25° bis $+30^\circ$
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, pflegeleicht, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Eine Farbe, keine Sonderfarben
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen

Produkt-Informationen

Spezifikationen und technische Eigenschaften

- Höhenverstellbereich: 52-96 cm
- Elektrische Höhenverstellung: per umlaufender Rundumschaltung
- zentrales Bremssystem
- Lenkrollen: 4 cm, versenkbar
- Gesamtlänge: 175 cm, 190 cm (mit ausgezogenem Fußteil)
- Polsterbreite (alle Segmente): 56 cm
- Polsterstärke: 40 mm
- Polsterhärte: 40 kg/m³
- Standard-Polsterfarbe: Marineblau (3)
- Belastbarkeit: 200 kg
- Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz (Schuko-Stecker)
- Schutzklasse: IP54
- Gesamtgewicht: 90 kg
- Rahmenkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl, drehpunktgelagert mit selbstschmierenden Buchsen

Abmessungen Polstersegmente

- Kopfteil (Zervikalbereich):
 - Länge Armlehnen: 31,5 cm
 - Breite Armlehnen: 12 cm
 - Länge Gesichtspolster: 32 cm
 - Winkelverstellung Kopfteil: +30° bis -25°, stufenlos einstellbar über Gasdruckfedern
- Brustbereich (Thorakalbereich): 25 cm
- Lendenbereich (Lumbalbereich): 30 cm
- Beckenbereich (Pelvisbereich): 25 cm
- Oberschenkel-/Hüftbereich: 45 cm
- Fußteil (verstellbar):
 - Grundpolster: 10 cm
 - Verlängerung (ausziehbar): bis zu 15 cm zusätzlich

Kopfteil und Armlehnen (Zervikalbereich)

- Integrierte Nasen-/Mundöffnung für freie Atmung in Bauchlage
- Unterstützt eine entspannte Kopfposition und erleichtert zervikale Manipulationen
- Stufenlos höhenverstellbares Kopfteil, optimal anpassbar an Körpergröße und Behandlungstechnik
- Armlehnen höhenverstellbar ermöglichen eine physiologische Schulterhaltung
- Ergonomische Armlagerung reduziert muskuläre Spannung und erleichtert therapeutischen Zugang
- Kopfteil mit oder ohne Drop-Funktion verfügbar, je nach Konfiguration

Fußteil (verstellbar)

- Tiefen- und höhenverstellbarer Fußbereich zur individuellen Anpassung an die

Körpergröße

- Ermöglicht eine variable Liegenlänge von 175 bis 190 cm
- Unterstützt optimale Lagerung der unteren Extremitäten bei verschiedenen Behandlungspositionen
- Verstellmechanik verbessert Flexibilität in der Therapie und Patientenpositionierung

Zervikal-Drop (Kopfteil)

- Aktivierung über Hebelsteuerung an der rechten Seite des Kopfteils
- Ermöglicht gezielte Drop-Technik im Bereich der oberen Halswirbelsäule
- Widerstand einstellbar über Drehrad auf der gegenüberliegenden Seite
- Drehung im Uhrzeigersinn erhöht den Drop-Widerstand
- Präzise Kontrolle über Impulstiefe und Geschwindigkeit für individuelle Patientenbedürfnisse

Thorakal-Drop (Brustbereich)

- Aktivierung des Drop-Mechanismus über Bedienhebel auf der rechten Seite des Thoraxsegments
- Unterstützt gezielte Impulstechniken im Bereich der Brustwirbelsäule
- Widerstand individuell einstellbar über Justierknopf auf der gegenüberliegenden Seite
- Drehung im Uhrzeigersinn erhöht die Drop-Federkraft

Lumbal-Drop (Lendenbereich)

- Drop-Funktion aktivierbar über Steuerhebel auf der rechten Seite des Lumbalsegments
- Speziell zur Manipulation und Mobilisation der Lendenwirbelsäule
- Widerstand einstellbar mittels Justierrad auf der gegenüberliegenden Seite
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn erhöht die Federspannung für den Drop
- Feinjustierbare Technik für kraftsparende, effektive Behandlungen im unteren Rückenbereich

Pelvic-Drop (Beckenbereich)

- Beidseitig aktivierbarer Drop-Mechanismus im Beckenbereich
- Hebelsteuerung nach rechts aktiviert den rechten Drop
- Hebelsteuerung nach links aktiviert den linken Drop
- Separate Widerstandsregelung für beide Seiten über Drehknöpfe links und rechts neben dem Steuerhebel
- Drehung im Uhrzeigersinn erhöht den jeweiligen Drop-Widerstand
- Ideal zur gezielten Mobilisation des Iliosakralgelenks und des Beckens bei asymmetrischen Befunden

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Giotto (Kunstleder mit brillanter Lederoptik)

Giotto ist ein leistungsstarkes, flammhemmendes Kunstleder mit eleganter Lederoptik und glänzender Oberfläche - speziell entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Physiotherapie, Osteopathie, Pflegeeinrichtungen, Spa- und Wellnessbereichen,

Kosmetikinstituten sowie Fitnessstudios. Dank seiner widerstandsfähigen Struktur und einfachen Reinigung ist es die ideale Lösung für stark frequentierte, hygienekritische Umgebungen. Die integrierte Vinyzene®-Technologie sorgt für einen zuverlässigen antimikrobiellen Schutz gegen Bakterien, Schimmel und Milben - und beugt damit unangenehmen Gerüchen und allergischen Reaktionen effektiv vor. Giotto erfüllt höchste Sicherheitsstandards: Es ist flammhemmend gemäß UNI 9175 Klasse 1.IM, EN 1021 Teil 2 und BS 5852 Teil 1. Mit 100.000 Martindale-Zyklen (ISO 5470-2) bietet es hervorragende Abriebfestigkeit für den täglichen, intensiven Gebrauch.

Die Reinigung ist besonders einfach: Leichte Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch und neutralem Reiniger entfernen; hartnäckigere Flecken können mit verdünntem Alkohol behandelt werden.

Eigenschaften: antibakteriell, pflegeleicht, wasserundurchlässig, schimmel- und bakterienresistent, phthalatfrei, komfortabel, elastisch, phthalatfrei, flammhemmend (UNI 9175 1.IM, EN 1021-2, BS 5852-1), reißfest (42/35 N gemäß UNI 4818-9 met.B), UV-beständig (Lichtechtheit 6 gemäß ISO 105-B02), Zusammensetzung: 88 % PVC / 12 % PES



Marineblau

(3)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de